

CLASSE

CLASSE A, HYDROCOLLOÏDE MONOPHASE HAUTE DÉFINITION POUR EMPREINTE MONOPHASE

- Le respect des recommandations vous permettra d'obtenir une empreinte précise, constante et reproductible.

- SELON L'APPLICATION, SI VOUS SOUHAITEZ UNE BASE DE VISCOSITÉ PLUS CONSISTANTE, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE DIMINUER DE 1 À 1,5 MM LE DOSAGE D'EAU EN DESSOUS DU TRAIT DE RÉFÉRENCE.

- Lors de vos premières manipulations, pour vous familiariser avec le produit, privilégiez les cas simples tel que Inlay-core ou couronnes avec ajustement justa ou supra gingivale.

> RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

1. UTILISER UN PORTE-EMPREINTE NON PERFORÉ

de type RIM Classe Apol et un adhésif (ou Bite-Tray pour unitaire).



2. NE PAS UTILISER LE CHLORURE D'ALUMINIUM POUR L'HEMOSTASE

il est incompatible avec les hydrocolloïdes. Si besoin, rétraction gingivale avec fils (ou autre procédé), imprégnation avec un sulfate ferrique.



3. POSER DES ROULEAUX SALIVAIRES HUMIDIFÉS.



4. TECHNIQUES D'INJECTION


A. PRÉPARATION AVEC RELIEF

Prélever de l'hydrocolloïde de votre mélange, puis l'induire au doigt*



B. PRÉPARATION AVEC INFRACTUOSITÉS

Injecter à la seringue, en particulier pour les Inlay-core.

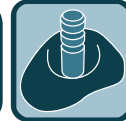

* La technique de l'induction au doigt a fait l'objet d'article publié dans la revue "Clinic" en Décembre 2002. Cette technique a été validée par un jury composé d'universitaires.

5. RESPECTER LE TEMPS DE TRAVAIL



TEMPS DE PRISE TOTAL : 3'35 min.

6. RETIRER LE PORTE-EMPREINTE DANS L'AXE DE LA PRÉPARATION

Utiliser le jet d'air de la seringue multifonction (ou la connexion de votre turbine).



7. TRAITEMENT DE L'EMPREINTE

A. NE PAS L'ENVELOPPER DANS UNE SERVIETTE HUMIDE :

1. Tremper
2. Rincer et égoutter
3. Mettre l'empreinte seule en sachet



(1)



(2)



(3)

B. AU LABORATOIRE :

48 heures de délai pour couler le plâtre

1. Privilégier l'utilisation d'un plâtre de type Fujirock GC
2. Pour les "mordus", couler le plâtre en premier sur la préparation



(1)



(2)



(2)

> Pour toute information complémentaire :

 **N° Vert 0800 88 09 63**